

OCUVANE® BABY

EGYSZER HASZNÁLATOS SZEMKÖRNYÉKI TISZÍTÓKENDŐ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ

A csipás, vörös, váladékos szemet gyermekeknek gyakran a könnycsatorna szűkülete okozza. Az elzáródás következményeként kialakuló könnycsorgás a szemfelszínen különféle kórokozók elszaporodásához és váladékozással járó gyulladáshoz vezet. Az **OCUVANE® BABY** szemkörnyéki tisztító kendő kíméletesen tisztítja és ápolja a szemhéjakat, hatékonyan csökkentve a gyulladásos tüneteket. E vitamin tartalma révén bőrnugyogató, hidratáló és regeneráló hatású. A gyermekek érzékeny bőrére kifejlesztett hypoallergén, könnymentes formula. Paraben, szinezőanyag és illatanyag mentes, pH semleges összetétel. 3 hónapos kortól alkalmazható.

Felhasználás

- Váladékos szemkörnyék tisztítására
- Könnycsatorna szűkület tüneteinek enyhítésére

Összetétel


Disodium Cocoamphodiacetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Polyhexamethylene biguanide, Tocopheryl-acetate (E-vitamin), Polysorbate 20, Víz

Használati útmutató

Használat előtt mosson kezet, nyissa ki a tasakot és vegye ki az impregnált **OCUVANE® BABY** szemkörnyéki tisztító kendőt.

Szemhéjak és szempillák tisztítása

Az ábrának megfelelően a törlőkendőt csavarja a mutatóujja köré, majd a gyermek zárt szemhéjait gyengéden törölje át a belső szemzugtól a külső szemzug felé irányuló hosszanti mozdulatokkal.

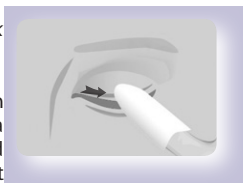

este, súlyosabb panaszok esetén naponta kétszer, reggel és este végezze, így eltávolíthatja a lerakódott szennyeződéseket a szemhéjak széléről.

⚠ Figyelmeztetések, óvintézkedések

Ne használja fel a törlőkendőt a csomagoláson feltüntetett lejáratí idő után, illetve amennyiben a csomagolás sérült.

A termék összetevőivel szemben arra érzékenyeknél nagyon ritkán felléphet túlérzékenységi reakció, melynek tünetei könnyezés, szemhéj kivörösödés, szemhéjduzzanat. Ilyenkor a törlőkendő használatát fel kell függeszteni. A fenti tünetek rövid idő alatt maradék nélkül megszűnnek, de a törlőkendő ismételt használata ilyen esetekben nem javasolt. Amennyiben a kezelés ellenére fokozódó gyulladásos tüneteket észlel (szemvörösség, könnyezés, váladékozás, fájdalom) haladéktalanul keressen fel szemorvost.

Tárolás:
Szobahőmérsékleten tárolandó.
Gyermekek elől elzárva tartandó!

Gyártó:
SolMed Pharma Kft,
1024 Budapest, Ady Endre u. 19.
Email: info@solmedpharma.hu

www.ocuvane.hu

A kezelést enyhe esetekben naponta egyszer