

# OCUVANE® PLUS

## EGYSZER HASZNÁLATOS SZEMHÉJSZÉLI TISZTÍTÓKENDŐ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ

Égő, vörös, irritált, száraz szem hátterében gyakran áll a szemhéjak gyulladása, melyet az ott lerakódott szennyeződések és allergének valamint Demodex fertőzés is okozhat. A panaszok tartós enyhítéséhez elengedhetetlen a szemhéjszéli gyulladás kezelése melynek révén helyreáll a szemhéjakban levő könnymirigyek működése. Az **OCUVANE® PLUS szemhéjszéli tisztítókendő** speciális összetevői révén hatékonyan eltávolítja a szemhéjszáron lerakódott szennyeződések, polleneket. Napi használata megszünteti a szemhéjszéli könnymirigyek elzáródását, ezáltal helyreáll az egészséges könnytermelés. A kendő teafa olaj hatóanyaga fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és regeneráló hatású, így segíti a panaszok hosszantartó enyhülését.

Kontaktlencse viselőknél is alkalmazható a lencse viselésével kapcsolatos diszkomfort érzés enyhítésére. Mindennapi kezelés esetén rendszerint már néhány nap alatt csökkennek a leggyakoribb panaszok, mint a vörösség, szemszárazság érzés, viszketés, szemfáradtság érzés, idegentest érzés.

### Felhasználás

- A szem száraz, égő érzésének csökkentésére
- Megerőltetett, vörös szem okozta panaszokra
- A szemhéjak Demodex fertőzésére

### Összetétel

Disodium Cocoamphodiacetate, Terpinen 4-ol (1%), Tocopheryl-acetate (E-vitamin), Polysorbate 20, Fragrance, Víz

### Használati útmutató

Használat előtt mosson kezet, nyissa ki a tasakot és vegye ki az impregnált **OCUVANE® PLUS szemhéjszéli tisztítókendőt**.


#### 1. Szemhéjak és szempillák tisztítása

Az ábrának megfelelően a törlőkendőt csavarja a mutatőujja köré, majd a zárt szemhéjak felszínét gyengéden törölje át a belső szemzug felé irányuló hosszanti mozdulatokkal.



#### 2. Szemhéjszél tisztítása

Tükör előtt a kinyitott szem alsó szemhéját tartsa kifordítva a szempillákra helyezett ujjakkal. A mutatőujjára tekert törlőkendővel gyengéd mozdulatokkal törölje át a szemhéj szélét hosszanti mozdulatokkal, több alkalommal. Ügyeljen, hogy a szemgolyót ne érintse meg. Egy másik törlőkendő alkalmazásával a kezelést végezze el a másik szemén is.

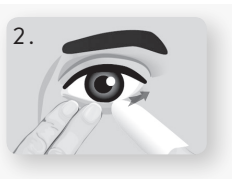

A kezelést enyhe esetekben naponta egyszer este, súlyosabb panaszok esetén naponta kétszer, reggel és este végezze, így eltávolíthatja a lerakódott szennyeződések a szemhéjak széléről.

### ⚠ Figyelmeztetések, óvintézkedések

Ne használja fel a törlőkendőt a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után, illetve amennyiben a csomagolás sérült. **A termék használata során enyhe csipő érzés előfordulhat, mely teljesen normális, rövid időn belül elmúlik.** A termék összetevőivel szemben arra érzékenyeknél nagyon ritkán felléphet túlérzékenységi reakció, melynek tünetei égő érzés, viszketés, könnyezés, szemhéj kivörösödés, szemhéjduzzanat. Ilyenkor a törlőkendő használatát fel kell függeszteni. A fenti tünetek rövid idő alatt maradék nélkül megszűnnek, de a törlőkendő ismételt használata ilyen esetekben nem javasolt. Amennyiben a kezelés ellenére fokozódó gyulladással tüneteket észlel (szemvörösség, idegentest érzés, könnyezés, vladékozás, fájdalom, homályos látás) haladéktalanul keressen fel szemorvost. Terhesség és szoptatás alatt is használható.

### 25°C Tárolás:

2°C Szobahőmérsékleten tárolandó. Gyermekek elől elzárva tartandó!



### Gyártó:

**SolMed Pharma Kft,**  
1024 Budapest, Ady Endre u. 19.  
Email: info@solmedpharma.hu

www.ocuvane.hu

