

# OCUVANE®

## EGYSZER HASZNÁLATOS SZEMHÉJSZÉLI TISZTÍTÓKENDŐ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ

Fáradt, irritált, vörös szemet okozhatnak a szemhéjszáron lerakódott szennyeződések, allergének, kontaktlencse viselése, hosszantartó monitor használat is, melyek a könnytermelés zavarához vezetnek. A panaszok tartós enyhítéséhez elengedhetetlen a szemhéjszél rendszeres tisztítása, ápolása melynek révén helyreáll a szemhéjakban levő könnymirigyek működése. Az **OCUVANE® szemhéjszéli tisztítókendő** speciális összetevői révén hatékonyan eltávolítja a szemhéjszálon lerakódott szennyeződések, polleneket. Napi használata megszünteti a szemhéjszéli könnymirigyek elzáródását, ezáltal helyreáll az egészséges könnytermelés. A kendő speciális hatóanyagai fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és regeneráló hatásúak, így javítják a szem komfortérzetét és a kontaktlencse viselés kényelmét.

### Felhasználás

- Bakteriális és allergiás kötőhártyagyulladás tüneteinek enyhítésére
- Száraz szem okozta panaszok esetén
- Fáradt szem tüneteinek enyhítésére
- Kontaktlencse viselés kényelmének javítására
- Szemműtét előtt és után a szemkörnyék tisztítására

### Összetétel

Disodium Cocoamphodiacetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Polyhexamethylene biguanide, Tocopheryl-acetate (E-vitamin), Polysorbate 20, Víz

### Használati útmutató

Használat előtt mosson kezet, nyissa ki a tasakot és vegye ki az impregnált **OCUVANE® szemhéjszéli tisztítókendőt**.

#### 1. Szemhéjak és szempillák tisztítása

Az ábrának megfelelően a törlőkendőt csavarja a mutatóujja köré, majd a zárt szemhéjak felszínét gyengéden törölje át a belső szemzugtól a külső szemzug felé irányuló hosszanti mozdulatokkal.

1.



#### 2. Szemhéjszél tisztítása

Tükör előtt a kinyitott szem alsó szemhéját tartsa kifordítva a szempillákra helyezett ujjakkal. A mutatóujjára tekert törlőkendővel gyengéd mozdulatokkal törölje át a szemhéj szélét hosszanti mozdulatokkal, több alkalommal. Ügyeljen, hogy a szemgolyót ne érintse meg. Egy másik törlőkendő alkalmazásával a kezelést végezze el a másik szemén is.

2.



A kezelést enyhe esetekben naponta egyszer este, súlyosabb panaszok esetén naponta kétszer, reggel és este végezze, így eltávolíthatja a lerakódott szennyeződések a szemhéjak széléről.

### ⚠ Figyelmeztetések, óvintézkedések

Ne használja fel a törlőkendőt a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után, illetve amennyiben a csomagolás sérült.

A termék összetevőivel szemben arra érzékenyeknél nagyon ritkán felléphet túlérzékenységi reakció, melynek tünetei égő érzés, viszketés, könnyezés, szemhéj kivörösödés, szemhéjduzzanat. Ilyenkor a törlőkendő használatát fel kell függeszteni. A fenti tünetek rövid idő alatt maradék nélkül megszűnnek, de a törlőkendő ismételt használata ilyen esetekben nem javasolt. Amennyiben a kezelés ellenére fokozódó gyulladáshoz tüneteket észlel (szemvörösség, idegteszt érzés, könnyezés, váladékózás, fájdalom, homályos látás) haladéktalanul keressen fel szemorvost. Terhesség és szoptatás alatt is használható.



### Tárolás:

Szobahőmérsékleten tárolandó.  
Gyermekek elől elzárva tartandó!



### Gyártó:

**SolMed Pharma Kft,**  
1024 Budapest, Ady Endre u. 19.  
Email: info@solmedpharma.hu

www.ocuvane.hu

